

機械器具(21)内臓機能検査用器具
 管理医療機器 特定保守管理医療機器 二酸化炭素モジュール 36552000

「CO₂センサキット TG-980シリーズ」の付属品

ネイザルアダプタ YG-225T

再使用禁止
 小児用ネイザルアダプタ YG-235T

【警告】

1. 使用方法

(1) ネイザルアダプタ(YG-225T/YG-235T)は、睡眠時の呼吸状態の診断のみに使用してください。無呼吸モニタや、生命維持や延命を目的とした状況下では使用しないでください。[重篤患者のモニタリングに使用すると、マウスガイドで口が覆われたときに適切な換気ができなくなることがあります。]

【禁忌・禁止】

本項では本品に関係する内容のみ記載しています。その他の項目については、接続する機器の付属文書を参照してください。

1. 適用対象(患者)

(1) ネイザルアダプタの新生児への使用[妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用の項参照]

2. 使用方法

(1) ネイザルアダプタは末滅菌品で、かつディスポーザブル製品です。使用は、1人の患者に一回限りとし、他の患者に使用しないでください。[交差感染を引き起こしたり、測定値が不正確になることがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

CO₂センサキット TG-900シリーズ(TG-970P)またはCO₂センサキット TG-980シリーズに接続して使用するネイザルアダプタです。

2. 構成

名称・型名	測定対象	個数	注文番号
ネイザルアダプタ YG-225T	体重10kg以上	10	V936A
小児用ネイザルアダプタ YG-235T	体重7kg以上の小児	10	V937A

3. 形状

<YG-225T>

<YG-235T>

各部名称は左記に同じ

0654-905250E

4. 適用機種

販売名	認証番号
1) CO ₂ センサキット TG-900シリーズ	21400BZZ00536000
2) CO ₂ センサキット TG-980シリーズ	227ADBZX00171000

5. シンボルマーク一覧

本品には以下のようなシンボルマークが使用されています。シンボルマークが示す名称および意味は下表のとおりです。

シンボルマーク	名称・意味	シンボルマーク	名称・意味
	注意		CEマーク
	製造業者		欧州代理人
	製造日		上
	ロットナンバー		壊れもの
	使用期限		上積み段数制限 (nは制限する段数)
	再使用不可、単回使用		水ぬれ防止
	温度制限		[気圧制限]
	医療機器 (欧州連合の法令要求マーク)		[湿度制限]
	カタログナンバー		型式・モデルナンバー
	機器固有識別		リサイクルマーク

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

CO₂センサキット TG-900シリーズ(TG-970P)またはCO₂センサキット TG-980シリーズの付属文書を参照してください。

【使用方法等】

本項では本品に関係する内容のみ記載しています。その他の項目については、CO₂センサキット TG-900シリーズ(TG-970P)またはCO₂センサキット TG-980シリーズの付属文書を参照してください。

1. 使用方法

(1) 装置に接続する


CO₂センサキットのインターフェースコネクタを、ベッドサイドモニタおよび他のモニタ装置の入力コネクタに接続します。

※接続方法の詳細は、組み合わせて使用しているベッドサイドモニタおよび他のモニタ装置本体の取扱説明書を参照してください。

(2) ネイザルアダプタにCO₂センサを接続する

CO₂センサをネイザルアダプタにカチッと音がするまではめ込みます。どちらの方向でもはめ込むことができます。

<例 YG-225T>

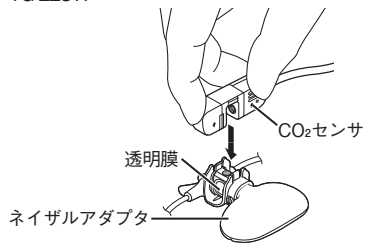

(3) ゼロ校正を行う

ネイザルアダプタにCO₂センサを接続した状態で大気に開放し、空気校正を行います。大気中のCO₂分圧値を約0.5mmHgとして校正します。

※校正方法の詳細は、組み合わせて使用しているベッドサイドモニタおよび他のモニタ装置本体の取扱説明書を参照してください。

(4) 患者に装着する

CO₂センサが手前にくるように、ネイザルチューブを鼻腔に挿入します。

(5) 睡眠評価装置または睡眠評価用センサに接続する

ネイザルアダプタのルアーロックを睡眠評価装置または睡眠評価用センサに接続します。

接続可能な睡眠評価装置・睡眠評価用センサには、以下の既認証品・既届出品があります。製造販売業者は全て日本光電工業株式会社です。

販売名		認証番号
①	睡眠ポリグラフィ装置 PSG-1100	223ADBZX00130000
販売名		届出番号
①	睡眠解析用センサ カニューレセンサ TR-121A	13B1X00206000008
②	睡眠解析用センサ カニューレセンサ TR-122A	13B1X00206000009

(6) センサを固定する

センサからでているセンサケーブルおよび圧力ニューレを耳にかけます。

(7) アジャスタを顎の下までスライドさせる

<例 YG-225T>




(8) テープで固定する


テープを約5cmに切り、1cmほどCO₂センサに貼り、残り4cmを鼻に貼りつけて固定します。

センサケーブルと圧力ニューレをテープで両頬に固定します。このとき、頬骨の部分に貼ると、口を動かしてもずれにくくなります。


<YG-225T>

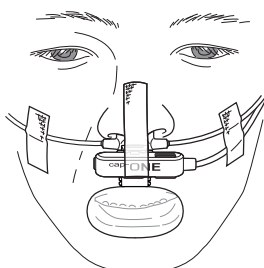


※横から見た図

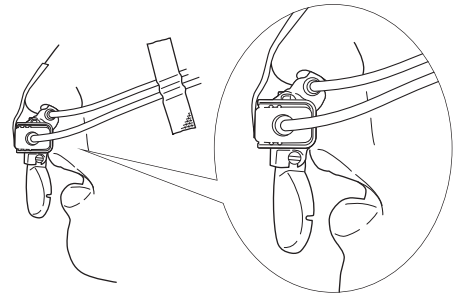

<YG-235T>

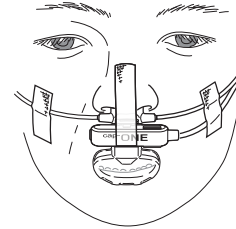


※横から見た図

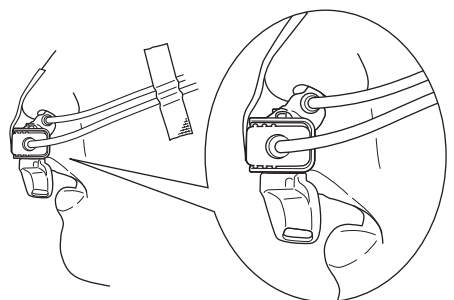


(9) CO₂センサを取り外す

ネイザルアダプタの突起部分を両手の親指で押し出して、CO₂センサを取り外します。

※ネイザルアダプタの装着や取外しは、手袋を装着して行ってください。

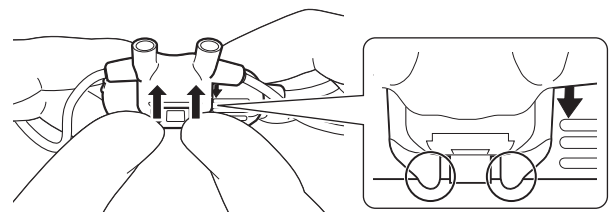

《悪い例》

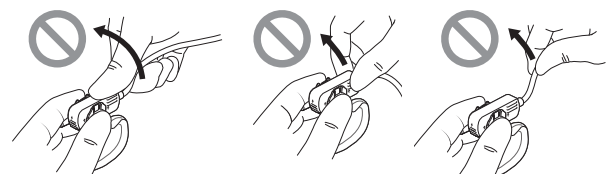

片側を持って外す①

片側を持って外す②

ケーブルを引っ張る


2. 使用方法等に関連する使用上の注意

(1) 全般的な注意事項

- 1) 患者に適したサイズのネイザルアダプタを選択してください。
- 2) ネイザルアダプタは使用直前まで開封しないでください。
- 3) ネイザルアダプタを交換したとき、また使用環境温度や使用場所が変わったときは、必ず校正を行ってください。
- 4) 挿入するときに、患者の鼻腔を傷つけないように気を付けて装着してください。
- 5) アジャスタはきつくなりすぎないように注意して固定してください。
- 6) 長時間使用する場合は、センサケーブルおよび圧力ニューレにゆるみがないか、皮膚を傷つけていないかを、適宜観察してください。

- 7) 圧カニューレやマウスガイドを強く引っ張らないでください。故障の原因になります。
- 8) テープ装着による皮膚損傷を予防するため、適宜患者の状態を確認してください。テープでかぶれた場合は、ただちに使用を中止し、医師の指示に従ってください。
- 9) マウスガイドと口唇の先端が離れすぎないように装着してください。マウスガイドが口唇から離れすぎていると、CO₂が検出できません。
ネイザルアダプタYG-225Tを使用する場合、マウスガイドと口唇の先端を1cm以内に保つようにマウスガイドの角度を調節してください。

YG-225Tのマウスガイドの固定の仕方

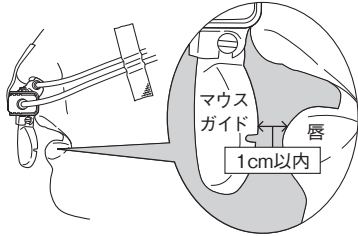

- 10) CO₂センサに無理な力が加わるとCO₂センサが破損する原因となります。
 - 11) CO₂センサを取り外すときは、センサケーブルやCO₂センサの片側を持って外さないでください。センサケーブルの断線やCO₂センサの破損の原因となります。
 - 12) オートクレーブおよびEOGによる滅菌はしないでください。ネイザルアダプタおよびCO₂センサキットを傷めるだけでなく安全性を保証できません。
 - 13) ネイザルアダプタの透明膜の内面には、呼吸、吸気の湿度によって曇らないように高性能の防曇膜でコーティングされています。防曇性能が劣化すると正しい測定ができませんので、下記の点を守って使用してください。
 - ・ネイザルアダプタは24時間の使用をめぐに新しいものと交換してください。
 - ・血液、痰あるいは粘膜が防曇膜に付着した場合は、新しいネイザルアダプタと交換してください。
 - ・透明膜に傷、ゴミ、薬液を付けないでください。特に内面の防曇膜を指で触ったり、汚れを拭いたり、クリーナなどで洗わないでください。
 - 14) 保存環境条件以外(高温時の車内、特にダッシュボードの上など)で保管しないでください。ネイザルアダプタが変形し、正しい測定ができなくなります。
 - 15) ネイザルアダプタやCO₂センサを、患者が噛んだり、飲み込んだりしないように注意してください。
 - 16) ネイザルアダプタの梱包箱は、ネイザルアダプタをすべて使用してから廃棄してください。ネイザルアダプタの型式や製造販売業者は、梱包箱のみに記載されています。
- (2) 清掃・消毒・滅菌に関する注意事項
- 1) ネイザルアダプタは、清掃、消毒および滅菌できません。汚れた場合はただちに新しいものに交換してください。
- (3) 輸送および保管に関する注意事項
- 1) 本品の輸送および保管時は、以下の環境条件を守って下さい。
 - ① 温度範囲 -20～+65℃
 - ② 湿度範囲 10～95% (ただし結露なきこと)
 - ③ 気圧範囲 700～1060hPa

【使用上の注意】

本項では本品に関係する内容のみ記載しています。その他の項目については、CO₂センサキット TG-900シリーズ(TG-970P)またはCO₂センサキット TG-980シリーズの付属文書を参照してください。

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- (1) 換気量の少ない患者[CO₂測定部に死腔があるため、患者の換気量と死腔量を考慮して使用してください。換気量が少ないと正しい測定値が得られないことがあります。]

- (2) 出血傾向、全身状態、栄養状態の悪い患者[マウスガイドが口元に接触し、褥瘡が形成されることがあるので、適宜患者の状態を確認してください。]

2. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

(1) 小児への適用

- 1) ネイザルアダプタの死腔量は1.1mLです。新生児には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 使用期限

製造月を含めて36ヵ月以内

【保守・点検に係る事項】

CO₂センサキット TG-900シリーズ(TG-970P)またはCO₂センサキット TG-980シリーズの付属文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 日本光電工業株式会社
電話番号： 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>