


機械器具 1 6 体温計
管理医療機器 電子体温計 14032010

予測式 キャラクター電子体温計

【警告】

- ・子供だけで使わないこと。
- ・乳幼児には舌下での測定は行わないこと。

【形状】

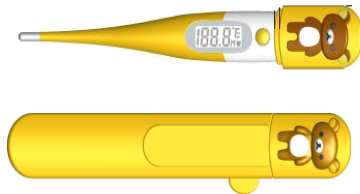

上図は収納ケースと一体になったもので代表例を示している。

【表示部】



【原理】

本品はサーミスタの抵抗変化を利用して温度を検出し体温として表示する。検温開始から 25 秒で予測検温が成立したブザーが鳴るが、そのまま計測を続けると実測検温になる。

【付帯機能】

- ・体温値記録機能：前回測定した温度を記録するメモリー機能
- ・告知機能：ブザーで予測温度成立を知らせ、そのまま計測を続けると開始から 5 分の実測値をお知らせする機能
- ・副表示機能：電池が消耗され、機能できなくなる電圧まで低下したことをお知らせする機能
- ・自動電源遮断機能：電源切り忘れても、電源 ON 後、11 分後に自動電源オフ、検温せずに 1 分以上放置すると自動電源オフ。
- ・電源制御機能：電源スイッチで ON/OFF の切り替えを行う機能

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて、腋窩又は口腔（舌下）の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示をする。

【品目仕様等】

- ・電 源：DC1.5V アルカリボタン電池
- ・最大許容誤差：±0.1℃以内
- ・電源電圧：機能できる直前の電圧において温度表示値が±0.2℃以内
- ・防浸：試験前後の温度表示値の差が±0.1℃以内
- ・測温範囲：32.0℃～42.9℃
- ・最小表示単位：0.1℃
- ・測定範囲外告知：
 - 31.9℃以下になると「L」表示
 - 43.0℃以上になると「H」表示

【EMC 適合】本製品は EMC 規格 IEC60601-1-1-2:2007 に適合。

【使用方法】

- (1) 電源スイッチを約 1 秒間押します。
- (2) “ピッ”音の後に表示部の全セグメントが表示されます。その後表示部の右下に“M”が表示され、前回測定温度値が 1 秒間表示され前回は予測検温であれば、予測マーク有り、実測検温であれば、予測マーク無。
- (3) その後、予測マーク点灯、L 表示、“℃”の点滅が開始し、測定可能となります。

- (4) 測温部を舌下又は腋下に密着させ安静にします。
- (5) 予測検温成立で予測マーク継続点灯、体温が表示されて“℃”が継続点灯
- (6) この時 37.8℃以上の場合にはピーピーピー音が 10 回鳴り、37.7℃以下の場合にはビッビ音が 5 回なる。
- (7) 測定が終わりましたら、電源スイッチを押せば、表示が消え、電源 OFF となります。電源スイッチを押さなかった場合は、11 分後に自動的に電源 OFF になる。
- (8) 測温部及び本体を乾いた布等で水気を拭き取ってから、保管ケースへ収納してください。
- (9) 実測検温の場合は予測検温終了のブザーが鳴っても体温計は体温計を動かさずにそのまま継続する
- (10) 約 1 分 30 秒後に表示を予測値から実測値に切り替える。同時に“℃”が開始。予測マーク消灯。
- (11) 実測検温を継続し 5 分後の検温値が 37.8℃以上の場合にはピーピーピー音が 10 回鳴り 37.7℃以下の場合にはビッビ音が 5 回なる。実測の体温値を読み取り、7 項、8 項に進み終了

【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で、目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 運動・食事・入浴の後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- (3) 舌下の温度を測定する時は、指定の場所に挿入し測定中は動かないでください。また、本体を強く噛まないでください。
- (4) 体温以外の測定に使用しないでください。

【貯蓄・保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所へ保管しないでください。
- (2) 保管ケースにいれて保管してください。

【取り扱い上の注意】

- (1) 分解・改造・修理は絶対に行わないでください。
- (2) 電池ケース部分は防水性がありません。電池ケース部に水等をかけたり、本体を水等につけたりしないでください。
- (3) 熱湯消毒はしないでください。
- (4) 超音波洗浄はしないでください。
- (5) 極端に曲げたり、落としたり強い衝撃を与えないでください。
- (6) 電池が消耗した場合、表示部の右下に電池低圧マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。

【保守・点検に関わる事項】

- (1) 長期間使用しなかった時は、使用前に清潔な状態にし、点検（電源が入る等）を確認してから使用してください。
- (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールをしみこませた布でよく拭いてください。

【包装】

本体・保管ケース 1 台／1 パッケージ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： 京中貿易株式会社

京都府京都市中京区西ノ京職司町 67-53

Tel:075-811-0545

製造業者： VEGA TECHNOLOGIES INC. (中国)

販売業者・お問合せ先：株式会社 エスケイジャパン

東京都江東区東陽 7-5-8 東陽町ML プラザ 302

Tel. 03-6660-5012 (内線：345)

取り扱い説明書を必ずご参照ください。