

## ポーテックス・麻酔マスク

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止


（使用方法）

- 1) 本品を可燃性麻酔薬の存在下で使用しないこと [非導電性であり、爆発の危険性があるため]。

### 【形状・構造及び原理等】

（形状・構造）

- |       |                 |        |
|-------|-----------------|--------|
| 15071 | プレミアムプラスフェイスマスク | 乳児用    |
| 15052 | プレミアムプラスフェイスマスク | 乳幼児用   |
| 15270 | プレミアムプラスフェイスマスク | 小児用    |
| 15248 | プレミアムプラスフェイスマスク | 小児用（大） |
| 15255 | プレミアムプラスフェイスマスク | 成人用    |
| 15245 | プレミアムプラスフェイスマスク | 成人用（大） |

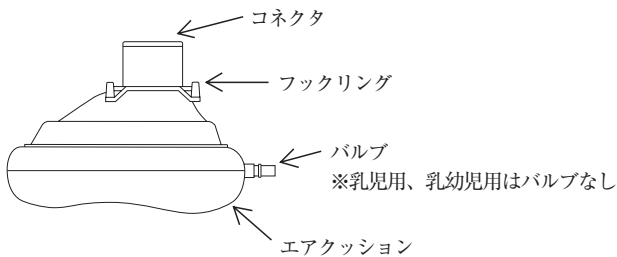

コネクタ：外径15mm（乳児用、乳幼児用）  
内径22mm（小児用、小児用（大）、成人用、成人用（大））

本品は、患者の気道に麻酔ガス又は酸素ガス等を供給するためのマスクであり、患者の鼻と口にあてて使用する。本品はバルブ付となしのものがあり、バルブ付は、マスクのエアクッションの膨らみを調整することができる。

（原理）

患者の鼻と口を覆うことによって、麻酔ガス又は酸素ガス等を患者に効率的に供給する。

（原材料）

ポリ塩化ビニル

- ・未滅菌

### 【使用目的又は効果】

（使用目的）

気道に酸素ガス又は麻酔ガス等を供給するために用いること。

### 【使用方法等】

1. 本品を患者の鼻と口を覆うようにあてます。バルブ付のマスクは、必要に応じ、シリンジをバルブに挿入し、空気の入注・脱気によってエアクッションの膨らみ具合を調整します。
2. 本品を麻酔回路等の患者側コネクタに接続します。
3. 必要に応じ、ヘッドストラップを用いて本品を患者の顔に固定します。

### 【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 本品の乳児用及び乳幼児用は、内径15mmのコネクタにのみ接続することができる。小児用から成人用（大）は、外径22mmのコネクタにのみ接続することができる。
- 2) 患者の顔に取り付けたマスクに過剰な圧力をかけないこと [顔面及び視神経が損傷する恐れがあるため]。

- 3) 本品の死腔の影響については患者毎に評価すること。

（その他の注意）

- 1) 本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと [交差感染の原因となったり、滅菌や洗浄剤溶液によって有害物質が残留する恐れがあるため]。

### 【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

（有効期間）

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

（使用期間）

- ・本品の推奨使用期間は最長30日である。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*（製造販売業者）

## smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

\*（問合せ先）

フリーダイヤル 0120-582-855

（製造業者）

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

（国名）

英国

（被包に記載されているシンボルの説明）

シンボル	定 義
	再使用禁止
	注意
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	製造業者
	有効期間
	品番
	天然ゴムラテックスは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	温度制限
	包装破損時使用不可
	数量