


【警告】
・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】
・人以外の検温にはご使用にならないでください。
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

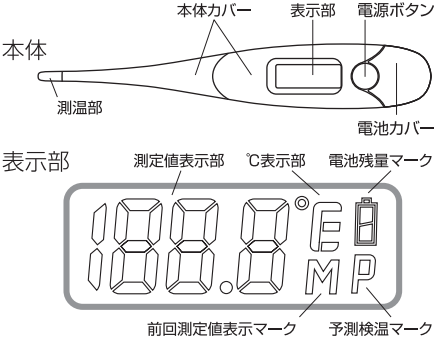

- <表示内容>
- ・測定値表示部：測定した最高温度を表示
31.9℃以下は「L」を表示
43.0℃以上で「H」を表示
 - ・前回測定値表示マーク：前回測定した測定値を表示
 - ・℃表示部：測定した温度とともに「℃」表示
 - ・電池残量マーク：電池の消耗時に表示
 - ・予測検温マーク：予測検温中に表示
- <本体の寸法および質量>
- ・寸法 長さ140mm 幅22mm 厚さ12mm
 - ・質量 13g（ボタン型電池を含む）
- <電気的定格>
- ・定格電圧:DC1.5V・電源:アルカリボタン型電池（LR41）
 - ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
 - ・電源に対する保護の程度による装着部の分類:B形装着部
- <原理>
- 測温部にあるサーミスタが温度により、電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、平衡温を予測した後、平衡温を体温として表示部に表示します。
- <付帯機能>
- ・初期動作確認告知、実測検温終了告知、測定温度範囲外告知、自動電源遮断機能、予測成立告知
- 【使用目的、効能又は効果】
- 測温部を部位に接触させて、脇下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する。

- 【品目仕様】
- | | |
|--------------|---|
| ・種類 | ：一般用 |
| ・方式 | ：予測・実測 |
| ・防湿 | ：一部防湿形（JIST1140:2014による） |
| ・温度測定範囲 | ：32.0～42.9℃
31.9℃以下になると「L」表示
43.0℃以上になると「H」表示 |
| ・測定精度 | ：±0.1℃（恒温水槽で実測測定した場合） |
| ・温度表示 | ：3桁デジタル |
| ・最小表示単位 | ：0.1℃ |
| ・最高温度保持機能 | ：実測した最高温度の測定値を保持する |
| ・前回測定値表示メモリー | ：前回測定した測定値を記憶保存する |

- 【操作方法又は使用方法等】
- (1) 電源ボタンを押す。
 - (2) “ピー”音の後に表示部の全セグメントが表示される。その後、表示部右上に“℃”右下に“M”が表示され、前回測定値が2秒間表示される。
 - (3) “L”が表示され、“℃”の点滅が開始し、予測検温マーク“P”が点灯し、測定可能となる。
 - (4) 測温部を脇下に密着させ安静にする。
 - ・予測検温の場合：
約15秒後にブザー音が“ピー、ピー、ピー”と3回鳴ったら予測検温が終了である。検温結果は約3分保持される。
 - ・実測検温の場合：
予測検温結果の保持後、予測検温マーク“P”が消え、実測検温になる。“℃”の点滅から点灯になり、“ピー”音が鳴ったら、実測検温が終了である。
 - (5) 表示部に測定された体温が表示される。
 - (6) 電源ボタンを押せば、電源OFFになる。
 - (7) 電源ボタンを押さない場合は、電源を入れてから約12分後に電源OFFになる。

- 【使用上の注意】
- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
 - (2) 運動、食事、入浴の後は十分な時間を置いてから体温を測定してください。
 - (3) 体温以外の測定及び、人以外の検温に使用しないでください。
 - (4) 脇下以外では検温しないでください。
 - (5) 本体に傷や破損がないことと確認し、異常がある場合は使用しないでください。

- 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気が多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
 - (2) ご使用後は、乾いた布等で測温部を拭き、清潔な状態で収納ケースへ収納し、保管してください。

- 【取り扱い上の注意】
- (1) 分解、改造、修理は絶対行わないでください。
 - (2) 電池カバー部分は防水性がありません。電池カバー部分に水等がかかたり、本体に水等をつけたりしないでください。
 - (3) 熱湯消毒はしないでください。
 - (4) 丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
 - (5) 極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください
 - (6) 体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
 - (7) 電池が消耗した場合、表示部の右上に電池残量マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
 - (8) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

- 【使用の期間】
- 使用の期間の目安：5年（自己認証）
- 【保守・点検に関わる事項】
- (1) 使用前に清潔な状態にし、 작동するか（電源が入るか）を確認してからご使用ください。
 - (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

- 【包装】
- 本体・収納ケース 1台／個

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ドリテック
製造業者：VEGA TECHNOLOGIES INC.（中国）
連絡先 株式会社ドリテック お客様相談センター
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
電話：0570-075-019
(月～金 9:00-12:00, 13:00-17:00
祝祭日および当社指定休日を除く)