

PORTEX・麻酔回路システム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


〈使用方法〉

- 1) 本品は可燃性麻酔薬の存在下で使用しないこと [本品は非導電性であり、爆発の危険性があるため]。
〈併用医療機器〉詳細は、【使用上の注意】の〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉を参照のこと。
- 1) 本品と人工鼻、人工鼻フィルタを接続する場合は、ネブライザ又は加温加湿器を併用しないこと [人工鼻、人工鼻フィルタ及びフィルタが目詰まり等を起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため]。
- 2) フィルタとネブライザを併用しないこと [フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難を起こすことがあるため]。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

450952-NL RX回路 成人用 107～305cm
GSエルボ フィルタ 3LバッグNL

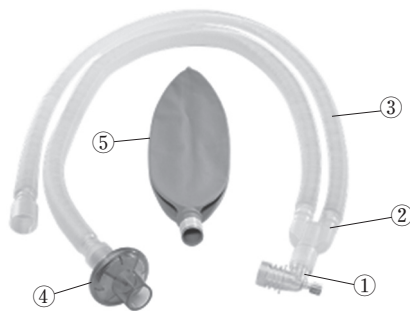

*〈構成品〉

①	患者側エルボーコネクタ（ガスサンプリングポート付）
②	Yピース
③	チューブ（蛇管）
④	呼吸回路除菌用フィルタ（2個）
⑤	麻酔バッグ

〈原材料〉

名 称		原 材 料
フィルタ	メディア	ポリプロピレン
麻酔バッグ（ノンラテックス）		ポリクロロブレン

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、麻酔器等に接続して使用する麻酔用呼吸器回路セットで、麻酔中の呼吸管理に必要な医療機器を予め組合せて提供するものである。

【使用方法等】

1. 規定の臨床ガイドラインに従って使用する麻酔システムすべてを点検してください。
2. 機器の各接続部と本品のコネクタやアクセサリを確実に接続してください。
3. 回路内を加圧し、回路や回路と機器との接続部でリークがないことを確認してください。
4. 本品にリークや閉塞、よじれ及びキンクが認められた場合は、新品に交換してください。

5. 伸縮性のある蛇管を伸ばす場合は、両手で蛇管を握り、伸ばし適切な長さに調節してください。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 本品とモニタ等の機器との接続はそれぞれの機器の取扱説明書に従って接続すること [互換性のあるインターフェース接続は、正確な診断、測定値と機器が正常に機能するためには必要であるため]。
- 2) 本品を使用する前に、必ず下記を実施すること。
 1. すべての付属品及び接続部を確実に接続すること。
 2. 回路を加圧し、リークがないこと、チューブに閉塞、よじれ及びキンクがないことを確認すること。
- *3) 伸縮性のある蛇管を引き伸ばす際に、コネクタや接続部を引っ張ると外れるおそれがあるので注意すること。
- *4) フィルタは、チューブ（蛇管）と麻酔器の間に接続すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- *1) フィルタ使用時は、気道内圧を常にモニタリングすること。気道内圧の上昇が認められた場合、フィルタが目詰まりしている可能性があるので直ちにフィルタを新品と交換すること。
- 2) フィルタは、吸気又は呼気側のフィルタとして使用すること。
〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉

1. 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
人工鼻、人工鼻フィルタ	ネブライザ又は加温加湿器を併用しないこと。	人工鼻、人工鼻フィルタ及びフィルタが目詰まり等を起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。
ネブライザ	フィルタと併用しないこと。	フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難を起こすことがあるため。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

- ・蛇管の閉塞、狭窄、潰れ、折れ、キンク、破損、リーク、変形
- ・フィルタの狭窄、閉塞、ソケット、コネクタの変形、破損、リーク
- ・麻酔バッグの破損

2) その他の有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性がある。患者の状態を十分に観察し、異常のおそれが生じた場合は、直ちに適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。

- ・感染
- ・リーク、閉塞等による呼吸不全

〈その他の注意〉

- 1) 本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと [交差感染の原因となったり、滅菌や洗浄剤溶液によって有害物質が残留するおそれがあるため]。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<https://www.smiths-medical.com/ja-jp>

〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国