

メディカット インフュージョン コネクター


再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

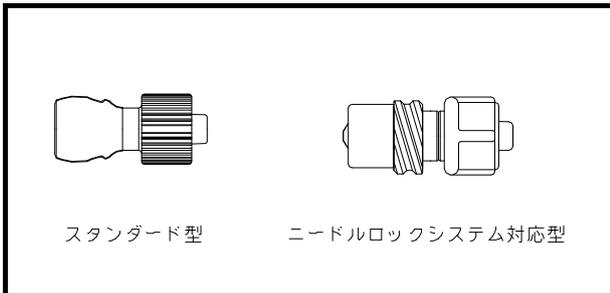

※本品は輸液セット内の薬剤混注部(混注部)にあたるロック式のコネクターである。

<種類>

スリーブの形状によりスタンダード型、ニードルロックシステム対応型の二種類がある。

<原材料>

※ゴムストップ(注入口):イソブレンゴム


【使用目的又は効果】

※本品は輸液セット内の薬剤混注部(混注部)にあたるロック式のコネクターである。
ゴムセプタム(イソブレンゴム製)への直接穿刺により、薬剤を間歇あるいは持続的投与することができる。

【使用方法等】

- ※1.輸液セットあるいは三方活栓等にセットし、ニードルロックシステムの回路とする。
- ※2.薬液を注入する際は、ゴムセプタムを消毒する。消毒の際にはアルコールを含有しない水溶性のポビドンヨード製剤又はクロルヘキシジン製剤を使用する。アルコール、あるいはアルコール含有消毒剤を使用する場合は、ゴムセプタムに留めること(図1参照)。
- ※<注意>ゴムセプタムの消毒は、こすりながら十分に行うこと。

※図1

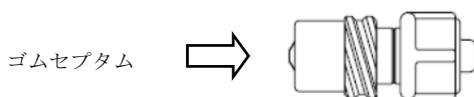

- ※3.金属穿刺針をゴムセプタムに穿刺し、薬剤を投与する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- ※●1.24mm金属穿刺針での穿刺回数30回をめぐり、コネクターを交換すること。[ゴムセプタムより液漏れを起こすおそれがあるため。]
- 使用中は本品の破損、接合部の外れや緩み及び薬液漏れ等に注意し、適宜締め直し等の適切な処置を行い、定期的に確認すること。[接続部は使用中に緩むことがあるため。]
- ※●消毒が必要な場合、アルコールを含有しない水溶性のポビドンヨード製剤又はクロルヘキシジン製剤を使用する。アルコール、あるいはアルコール含有消毒剤を使用する場合は、ゴムセプタム(図1矢印部)に実施すること。[アルコール含有消毒剤及び脱脂目的のアセトン等に接触すると強度が低下し亀裂が生ずるおそれがあるため。]

2.不具合・有害事象

輸液回路への注入操作中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら、直ちに適切な処置を行うこと。

重大な不具合

- 1.気泡の混入
- 2.亀裂の発生

重大な有害事象

体内へのゴム片の迷入

【保管方法及び有効期間等】

1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

※日本コヴィディエン株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205