


機械器具 60 歯科用エンジン

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

歯科用 CAD/CAM マシン DWX-52D DGS SHAPE

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

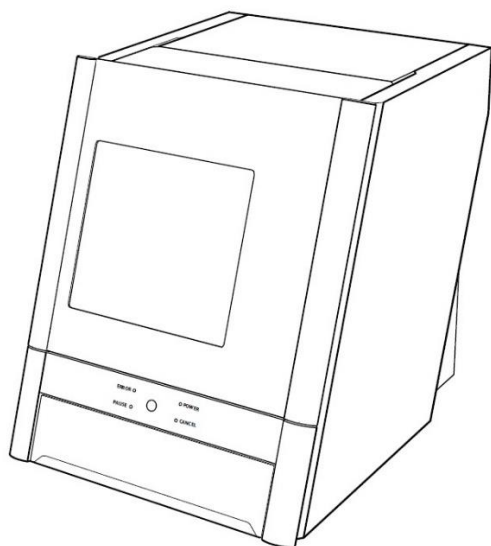

2. 寸法・質量

幅×奥行×高さ：495×660×600mm
質量：約67kg

3. 電気規格

AC100～240V, 50/60Hz
消費電力：約200W

4. 動作原理

メインスピンドルに回転運動を与え、X、Y、Z 軸及び A、B 軸方向の CNC 制御により、材料とミリングバーを接触させて切削加工を行う。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

CAD/CAM 技術を利用して、歯科技工士及び歯科医師が行う歯科用補綴物の作製を支援する。

2. 効果

歯科用補綴物を迅速、かつ、高精度に作製する。

3. 加工可能な材料

切削加工用に円盤状に成形された以下の材料
歯科切削加工用セラミックス、歯科切削加工用レジン材料、歯科用キャスティングワックス、歯科非 casting コバルト・クロム合金

ピン型には付属のホルダーが必要です。

4. 一般的名称の定義

複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計 (CAD) 又はコンピュータ支援製造 (CAM) に用いるものをいう。

【使用方法等】

1. 使用環境条件

使用場所：室内
温度：5～40℃
湿度：35～80% (結露のないこと)

2. 操作方法

- (1) 電源の投入
- (2) ワークの取り付け
- (3) ツール (ミリングバー) の取り付け
- (4) コンピュータから加工データの送信
- (5) 加工開始

詳細な操作方法是取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

その他の注意

- (1) 本機器を患者環境内で使用しないこと。
- (2) 精密機器のため、取扱には十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管する。
- (2) 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意して保管する。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
- (4) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

耐用期間・使用期間

適正な保守点検及び修理が行われた場合に限り5年間とする (自己認証)。
ただし、耐用期間は使用条件、使用環境により差異を生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常的な保守・点検

使用後の清掃

2. 定期的な保守点検

定期的な補正と清掃

詳細は取扱説明書をご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

DGS SHAPE 株式会社

住所：静岡県浜松市北区新都田一丁目1番2号 *

電話番号：053-482-7069

【お問い合わせ先】*

フリーダイヤル：0120-118-233

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00

(土日祝および指定休業日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。