

医04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

オオサキ医療ガーゼ30

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌は避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町203番地

お問い合わせ先 Tel 052-501-2167

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ製品です。

形状は米国薬局方（U S P）タイプIVに適合。

条数（本） 縦糸 22-26/2.54cm 横糸18-22/2.54cm
2.54×2.54平方cmの条数 41-47

重量(g/平方m) 24.1-31.1

製造業者

オオサキメディカル株式会社

本社工場 〒452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町206番地

郡上工場 〒501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納514番地

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【品目仕様等】

形状は米国薬局方、他仕様は「医療ガーゼ・医療脱脂綿基準」に従う。

本品は滅菌品ではない。

【操作方法又は使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

平	30cm×30cm	150枚入紙包装
2ツ折	30cm×30cm	150枚入紙包装
4ツ折	30cm×30cm	150枚入紙包装
8ツ折	30cm×30cm	150枚入紙包装
特製	病院特製仕様	