

医04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

OPガーゼX-A

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影剤を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるので、X線造影剤部分以外のガーゼを挟んで使用すること。
- ** ●X線造影剤に電気メス等を近づけると、切れたり発火するおそれがあるので、注意して使用すること。
- 滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌は避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町203番地

お問い合わせ先 Tel 052-501-2167

製造業者

オオサキメディカル株式会社

本社工場 〒452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町206番地

郡上工場 〒501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納514番地

【形状・構造及び原理等】

X線造影剤を入れたガーゼ製品です。

ガーゼの材質：綿100%

X線造影剤(青線)の材質：

(固定材) ポリプロピレン、ポリエステル他

(造影剤) 硫酸バリウム (着色剤) 深海青グレード02

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。

X線を検知できる成分を用いている。□

【品目仕様等】

自社規格「旧医用不織布ガーゼ基準」に従う。

本品は滅菌品ではない。

【操作方法又は使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。
- 滅菌後は、再滅菌しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

青線 平	30cm×30cm	300枚入紙包装
青線 2ツ折	30cm×30cm	300枚入紙包装
青線 4ツ折	30cm×30cm	300枚入紙包装
青線 三角折	30cm×30cm	300枚入紙包装
青線 イカ折	30cm×30cm	300枚入紙包装
特製		病院特製仕様