

パール綿球X-A

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるので、X線造影糸部分以外のガーゼを挟んで使用すること。
- ** ●X線造影糸に電気メス等を近付けると、切れたり発火するおそれがあるので、注意して使用すること。
- 滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌は避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社
〒452-0812 愛知県名古屋市西区玉池町203番地
お問い合わせ先 Tel 052-501-2167

製造業者

オオサキメディカル株式会社
本社工場 〒452-0812 愛知県名古屋市西区玉池町206番地
郡上工場 〒501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納514番地

【形状・構造及び原理等】

- 綿100%の脱脂綿を球状にして、フィブリル化セルロースを噴霧した後、X線造影材（青線）を縫い込んだ製品です。
X線造影材（青線）の材質：
（固定材）ポリプロピレン、ポリエステル他
（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）深海青グレード02
- 紐付は綿100%の糸を付けた製品です。
- 医療ガーゼで覆ったものもございます。

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。□

【品目仕様等】

自社規格「旧医用不織布ガーゼ基準」に従う。
本品は滅菌品ではない。

【操作方法又は使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。
- 滅菌後は、再滅菌しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

No.20 20mm(直径) 100球入袋包装
特製 病院特製仕様