

縫製ガーゼX-A

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるので、X線造影系部分以外のガーゼを挟んで使用すること。
- ** ●X線造影系に電気メス等を近付けると、切れたり発火するおそれがあるので、注意して使用すること。
- 滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌は避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社
〒452-0812 愛知県名古屋市西区玉池町203番地
お問い合わせ先 Tel 052-501-2167

製造業者

オオサキメディカル株式会社
本社工場 〒452-0812 愛知県名古屋市西区玉池町206番地
郡上工場 〒501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納514番地

【形状・構造及び原理等】

- 医療ガーゼとX線造影材入りガーゼを縫製した製品です。
ガーゼの材質：綿100%
X線造影材（青線）の材質：
（固定材）ポリプロピレン、ポリエステル他
（造影剤）硫酸バリウム（着色剤）深海青グレード02
縫製系の材質：綿100%
- 柄付は綿100%の紐を付けた製品です。

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。□

【品目仕様等】

自社規格「旧医用不織布ガーゼ基準」に従う。
本品は滅菌品ではない。

【操作方法又は使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。
- 滅菌後は、再滅菌しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

20204P	20cm×20cm 4ply 柄付	20枚入箱包装
30304P	30cm×30cm 4ply 柄付	20枚入箱包装
30308P	30cm×30cm 8ply 柄付	20枚入箱包装
30454P	30cm×40cm 4ply 柄付	20枚入箱包装
30458P	30cm×45cm 4ply 柄付	20枚入箱包装
45454P	45cm×45cm 4ply 柄付	20枚入箱包装
45458P	45cm×45cm 8ply 柄付	20枚入箱包装
30608P	30cm×60cm 8ply 柄付	20枚入箱包装
60608P	60cm×60cm 8ply 柄付	10枚入箱包装
特製	病院特製仕様	