

医04 整形用品

一般医療機器	手術用被覆・保護材	34654000
	熱傷被覆・保護材	11322101
	医療用不織布	34655000

オオサキサンドガーゼC

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

本品は術後創傷、熱傷皮膚、創傷等の被覆・保護のために患部に貼って使用する多層構造のシート材で、滲出液等の漏出を防止する防水材、吸収性能を有する吸収材、創傷接触面である表面材の三層からなる製品です。

【使用目的又は効果】

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。また熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。また、創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

- 患部の大きさに応じ、適当な大きさのものを選択し使用すること。
- 適宜滅菌して使用すること。
- 滅菌は、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 患部に感染症状(発疹、発赤、かゆみ、はれ、痛み、発熱)が認められる場合は使用しないこと。
- 本品使用中に、皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- 患部の観察を十分に行い、滲出液の量や患部の状態に応じ、適切な交換及び処置を行うこと。
- 交換時には無理にはがさないこと。
- 体内に留置しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。