

医04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

オオサキ デンタルコットンⅠ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿を円柱状にした製品です。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

口腔内の診察及び治療時に患者の口腔内に一時留置し、薬物塗布や体液などの吸収、また診察・治療のための空間確保のために用い、使用後は速やかに取り出し廃棄する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 意識レベルを考慮し、誤飲や誤食に留意して使用すること。
 - 使用中は口腔内の状態を適宜確認し、過度な圧迫や摩擦が加わらないよう注意すること。
[患者の状態及び局所圧迫、摩擦の程度によって、出血、水泡、潰瘍、疼痛、痺れなどの症状を有する恐れがあるため。]
 - 使用前に形状の変更や加工してから使用しないこと。
 - 診察及び処置終了後は速やかに、また確実に取り出すこと。
- その他の注意
 - 包装及び本品が汚損又は破損している場合は使用しないこと。
 - 開封後は早めに使用すること。
 - 適宜滅菌して使用すること。
 - 創傷面には滅菌して使用すること
 - 滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。プラズマ滅菌はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039