

うで用マルチランセット

【警告】

●適用対象(測定者)

①採血を行ったあとの穿刺針には血液が付着しています。病原微生物の感染を防ぐために、使用後はかかりつけの医師の指示にしたがって他人に触れないように捨ててください。

②前腕から採血をするときは、血管の見える部分からの採血をお勧めください。

●使用方法

うで用マルチランセットをご使用いただくことで、前腕からの採血により測定を行うことが可能ですが、低血糖など(発汗/冷汗/浮腫感、震えなどの症状)の可能性があるときは、指先から採血を行ってください。

- ・低血糖の可能性があるとき
- ・低血糖かどうか調べるとき
- ・血糖低下状態だと思われるとき
- ・運動の後など、血糖値が急激に変化する可能性があるとき
- ・かぜをひいたときなど、体調のすぐれないとき

※急激な血糖の変動が認められるとき、前腕の血糖変動は、指先よりも遅れるとの報告があります。

【禁忌・禁止】

①穿刺針は1回限りの使い捨てです。一度使用した穿刺針は再使用せずに必ず新しい穿刺針をご使用ください。

②個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと。

[付着した血液を介して病原微生物に感染する恐れがあるため]


③血糖測定をするときは、血糖測定機の取扱説明書を必ずお読みください。

④穿刺針は小児の手の届かないところに保管してください。

⑤うで用マルチランセットを採血以外の目的で使用しないでください。

* *

【形状・構造等】

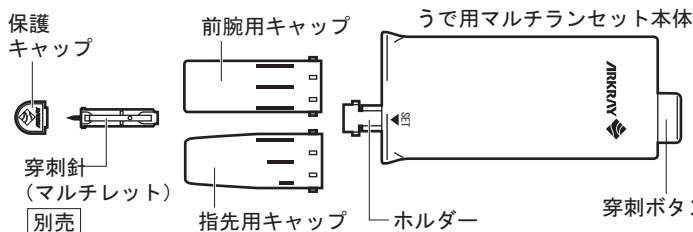

【性能・使用目的】

使用目的

前腕、および指先から血糖値等を測定するために微量の血液を採取する器具です。

【操作方法又は使用方法等(用法・用量含む)】

前腕から採血する場合の使用方法

1. 穿刺針のセット

- ① キャップを取りはずす
- ② 穿刺針を取りつける
- ③ 穿刺針の保護キャップをはずす
- ④ キャップを取りつける

2. 前腕からの採血

- ① 吸引する
- ② 穿刺する
- ③ 採血量を確認する
- ④ 吸引を解除する
- ⑤ 血糖値を測定する

3. 穿刺針の取りはずし

- ① 保護キャップをかぶせる
- ② 穿刺針を取りはずす

※詳細な使用方法、および指先から採血する場合の使用方法は取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- * * ①前腕用キャップ、指先用キャップをはずすときは、針先が指などに触れないように注意して操作してください。
- * * ②前腕からの採血は、体質、皮膚の特性などにより困難なことがあります。
- * * ③前腕から採血する場合、体質、採血部位などにより内出血することがあります。
- * * ④前腕から採血する場合、体質によっては、採血部位の傷が治るのに数日間かかることがあります。
- * * ⑤穿刺後は消毒綿やばんそうこうで止血および、保護をしてください。
- * * ⑥使用後は取扱説明書を参照いただき、お手入れをしてください。
- * * ⑦穿刺針は専用穿刺針「マルチレット」(別売)をご使用ください。
- * * ⑧うで用マルチランセットは、消毒液への浸漬や噴霧または高濃度殺菌(オートクレーブや煮沸など)をしないでください。故障の原因となります。
- * * ⑨使用前に針をつけて動作確認を行ってください。動作確認で針がもどらずに出たままの状態になる場合には、そのうで用マルチランセットは使用しないでください。

<動作確認>

1. 指に当てずに穿刺ボタンを押します。
 2. 前腕用キャップ、指先用キャップより針が出たままの状態でないことを確認します。
- * * ⑩使用後に前腕用キャップ、指先用キャップより針が出ていないことを確認してください。針が出たままの状態の場合には使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び有効使用期間等】

有効使用期間：使用開始後3年[自己認証(当社データ)による]
条 件：取扱説明書や添付文書に示す使用上の注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。

【包装】

1本単位で梱包しています。

- * * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

販 売 **サノフィ・アベンティス株式会社**
〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
TEL 0120-49-7010

発 売 **アークレイ株式会社**
〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57
TEL 0120-81-1955

製造販売 **株式会社アークレイ ファクトリー**
〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子1480

製 造 **株式会社アークレイ ファクトリー**

取扱説明書を必ずご参照ください