

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

キャストイングワックス

*【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、カルナバワックス

形状：缶入、棒状

原理：適度な温度で温める。

ハード	インレーやクラウン&ブリッジの辺縁部 パーシャルデンチャーの床辺縁部 クラスプ等の接合部
ミディアムハード	クラウン&ブリッジの歯冠形成用
ミディアムソフト	
ソフト	鑄造用パターンの内層用

*【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストイングワックスをいう。

*【使用方法等】

- 1) 加熱されたインスツルメントを使用し、適度に溶解させたところで支台歯模型に盛り上げていきます。
- 2) 上記作業を繰り返し、クラウン及びインレーの形状を作製します。
- 3) 彫刻刀などを使用して補綴物外形を完成させます。
- 4) ワックスパターンの埋没、焼成、鑄造は通法に従い作業してください。

*【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本品は可燃性のため、使用の際に火傷に注意すること。
 - ②本品を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。また、消火器具を備えること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。
- ・保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～午後5:00