

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

エステ コットンバフ

【形状・構造及び原理等】

形状：φ100×8mm

素材：綿、合成皮革

構造：レーズ装着用に中央に穴の開いた円盤状のバフ。

原理：歯科用レーズにより回転を与え、ルージュ等の研磨材を塗布して、義歯床の艶出し研磨を行う。

※【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

※【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用レーズのバフ用金具に取り付け固定します。
- 2) 本品に回転を与え、「エステ シャイン」（研磨材）を塗布し、義歯床を研磨します。
- 3) 必要に応じて本品を使用する前に荒研磨後、「エステ ポリッシュサンド」で砂研磨しておくとな艶出しがより効果的に行えます。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) レーズに確実に固定されていることを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認すること。
- 3) 本品は最高回転数（5,000rpm）を超えて使用しないこと。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

※【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①目の損傷を防ぐ為に、保護メガネを使用すること。
 - ②劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、専門医の診断をうけること。

※【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的付加）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン
住所：〒621-0001
京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前 10：00～午後 5：00
販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00