

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## エステ シャイン

### 【形状・構造及び原理等】

形状：淡黄色の固形物  
成分：酸化アルミニウム、脂肪酸 他  
原理：歯科用レーズ等に塗布し、義歯床の艶出し研磨を行う。

### \*【使用目的又は効果】

エステショット床義歯、その他レジン床義歯、歯科用金属など、補綴物等の研磨に用いる。

### \*【使用方法等】

＜エステ シャイン＞

- 1) 本品を歯科用レーズに取り付けた「エステ コットンパフ」又は布パフ等に押し当てるように塗布します。
- 2) 義歯等の被研磨物を回転している「エステ コットンパフ」又は布パフ等に押し当てて艶出しします。

＜エステ シャインHP＞

- 1) 本品を歯科用駆動装置及びハンドピース等に取り付けた「エステ ホイール HP」又はフェルトホイール等に塗布します。
- 2) 「エステホイール HP」又はフェルトホイール等を回転させ、義歯等の被研磨物に押し当てて艶出しします。
- 3) 必要に応じて本品を使用する前に荒研磨後、「エステ ポリッシュ サンド」で砂研磨しておくこと艶出しがより効果的に行えます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

研磨に適した使用回転数の範囲内で使用すること。

### \*【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、保護メガネや局所吸塵装置、公的機関の検定に合格した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

#### 2) 重要な基本的注意

本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、専門医の診断をうけること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・ 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的付加）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・ 高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

\*\*・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～午後 5：00

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00