

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

エステ ポリッシュサンド

【形状・構造及び原理等】

形状: 粉末
成分: 石英
原理: 研磨砂を義歯床研磨面及び回転ブラシに停留させ、物理的に研磨させる。

*【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

*【使用方法等】

- 1) 適量の水を加えて泥状にして義歯床に塗布し、回転ブラシ等で研磨します。
- 2) 必要に応じて本品を使用する前に荒研磨しておくことと研磨がより効果的に行えます。
- 3) 本品で研磨後、「エステ シャイン」、「エステ コットンバフ」にてルージュ研磨を行うと艶出しが可能です。

[使用方法に関連する使用上の注意]
研磨に適した使用回転数の範囲内で使用すること。

*【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、保護メガネや局所吸塵装置、公的機関の検定に合格した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、専門医の診断をうけること。
 - ②本品を使用する際には、粉塵による人体の影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。(吸入すると肺が損傷されるおそれがある。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]
・水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的付加)及び汚染を受けないように保管すること。
・高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

*
製造販売元 : 株式会社ニッシン
住所 : 〒621-0001
: 京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
電話番号 : 0120-571939 (フリーダイヤル)
: 電話受付時間 月～金(祝日を除く)
: 午前10:00～午後5:00
販売元 : 株式会社アイキャスト
電話番号 : 0120-228582 (フリーダイヤル)
: 電話受付時間 月～金(祝日を除く)
: 午前10:00～12:00 午後1:00～5:00