

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## エステ ホイール HP

### 【形状・構造及び原理等】

形状・構造：作業部 海綿状綿 φ22mm

軸部 クロムメッキ鋼

軸部形式 HP 用

原理：作業部に「エステ シャイン」（研磨材）等を塗布し、艶出し研磨を行う。

### \* 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

### \* 【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させ、作業部に「エステ シャイン」（研磨材）等を塗布し、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて艶出し研磨を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従ってシャンク（軸部）を確実に奥まで挿入して、半チャック状態でないことを確認すること。
- 2) 予め予め回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 本品は歯科技工用研削器具のため、口腔内では使用しないこと。
- 4) 本品は最高回転数（10,000rpm）を超えて使用しないこと。
- 5) 無理な角度、過度の加圧では使用しないこと。

### \* 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

- ① 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ② 損傷、変形などのあるものは、使用しないこと。
- ③ 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④ 劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。

#### 2) 重要な基本的注意

本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、専門医の診断をうけること。

### \* 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的付加）及び汚染をうけないように保管すること。
- ・ 高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。
- ・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### \*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\* 製造販売元 : 株式会社ニッシン  
住所 : 〒621-0001  
: 京都府亀岡市旭町樋ノ口 88  
電話番号 : 0120-571939（フリーダイヤル）  
電話受付時間 月～金（祝日を除く）  
午前 10：00～午後 5：00  
販売元 : 株式会社アイキャスト  
電話番号 : 0120-228582（フリーダイヤル）  
電話受付時間 月～金（祝日を除く）  
午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00