

歯科材料07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストینگワックス 16189000

## ベレッツァ WAXディスク

### \*【形状・構造及び原理等】

組成:パラフィンワックス、ポリエチレン系樹脂、染料  
形状:ディスク状 φ98×20mm  
原理:ワックスブロック体をコンピュータ支援設計・製造ユニットにより切削加工機を用いて切削し、パターンを作製する。  
色調:グリーン

番号	項目	仕様
1	外観	異物が存在しないこと
2	焼却残さ	0.1%以下

### \*【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストینگワックスである。

### \*【使用方法等】

- 1) スキャニングマシンにて支台歯模型を計測します。
- 2) 計測データを基にソフトウェアを用いてミリングデータを作成します。
- 3) 本品をミリングマシンにセットし、ミリングデータを用いて加工を行います。
- 4) 加工完了後、余剰部分を削除します。
- 5) 加工品に付着した切削屑などを除去します。
- 6) 加工品を通法に従って、形態修正等を行います。
- 7) ワックスパターンの埋没、焼成、鑄造は通法に従って行いません。

### \*【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ① 本品を切削、研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可したマスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
  - ② 本品を切削、研磨する際には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等の防具を使用すること。
  - ③ 本品に割れ、欠けが生じた際には、手などを切る恐れがあるので注意すること。
  - ④ 本品は可燃性のため、使用の際に火傷に注意すること。
  - ⑤ 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ニッシン  
住所 : 〒621-0001  
: 京都府亀岡市旭町樋ノ口88  
電話番号 : 0120-571939 (フリーダイヤル)  
: 電話受付時間 月～金(祝日を除く)  
: 午前10:00～午後5:00  
製造元 : 日進歯科材料(昆山)有限公司  
: Nissin Dental Products(Kun Shan)Co.,Ltd.  
国名 : 中国  
販売元 : 株式会社アイキャスト  
電話番号 : 0120-228582 (フリーダイヤル)  
: 電話受付時間 月～金(祝日を除く)  
: 午前10:00～12:00 午後1:00～5:00