

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000
ベレッツァ 4x ミリングバー

***【形状・構造及び原理等】**

[形状・構造] (単位：mm)

規格	仕様		材質
DCバー φ2mm	作業部形状	ボールエンド	超 硬 合 金
	作業部径	φ2	
	軸径	φ6	
	全長	55	
	作業部長さ	20	
	コーティング	ダイヤモンド	
DCバー φ1mm	作業部形状	ボールエンド	超 硬 合 金
	作業部径	φ1	
	軸径	φ6	
	全長	55	
	作業部長さ	16	
	コーティング	ダイヤモンド	
TiSiバー φ0.6mm	作業部形状	ボールエンド	超 硬 合 金
	作業部径	φ0.6	
	軸径	φ6	
	全長	56	
	作業部長さ	5	
	コーティング	WXL コート	
ダイヤモンドバー φ2mm	作業部形状	ボールエンド	S U S
	作業部径	φ2	
	軸径	φ6	
	全長	50	
	作業部長さ	12	
	コーティング	ダイヤモンド電着	
ダイヤモンドバー φ1mm	作業部形状	ボールエンド	S U S
	作業部径	φ1	
	軸径	φ6	
	全長	50	
	作業部長さ	10	
	コーティング	ダイヤモンド電着	

原理：専用の加工機に取り付けて切削加工を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。
専用の加工機に取り付けて、歯科材料の研削加工に用いる。

【使用方法等】

本品は、歯科技工用CAD/CAM装置に装着して使用する研削器材です。

[組合せて使用する医療機器]

販売名：ベレッツァ 4x ミリングマシン

届出番号：26B1X10008000044

[使用方法]

- ベレッツァ 4x ミリングマシンの取扱説明書に従い、本品をベレッツァ 4x ミリングマシンに取り付けます。
- ベレッツァ 4x ミリングマシンに加工データを転送して切削加工を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 本品をベレッツァ 4x ミリングマシンに確実にセットし、振れがないことを確認すること。
- 使用前・使用後に変形や破損等がないかを確認すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は、ベレッツァ 4x ミリングマシン以外の加工機には使用しないこと。
- ②損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）などのあるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10：00～午後5：00

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10：00～12：00 午後1：00～5：00