

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

ベレッツァ 5x ミリングバー

****【形状・構造及び原理等】**

形状・構造

(単位：mm)

種類	作業部径	コーティングの種類
ジルコニア用	φ0.3	コーティングなし
	φ0.6	DLC
	φ1	DLC
	φ2	ダイヤモンド
メタル用	φ0.6	TiSiN
	φ1	TiSiN
	φ1.5	TiSiN
	** φ1.5*L5	TiSiN
	φ1.5*L6	TiSiN
	φ2	TiSiN
インプラントバー用	φ3	TiSiN
	φ1.5 Drill	TiSiN
	** φ1.5*L7	TiSiN
	** φ1.5*L14	TiSiN
	φ1.75	TiSiN
	φ2*L6	TiSiN
セラミック用	φ2*L18	TiSiN
	** φ2.0 Drill	TiSiN
	φ0.6	ダイヤモンド電着
	φ1	ダイヤモンド電着
	φ1.5	ダイヤモンド電着
	φ2	ダイヤモンド電着
	φ2.5	ダイヤモンド電着

原理：専用の加工機に取り付けて切削加工を行う

【使用目的又は効果】

専用の加工機に取り付けて、歯科材料の研削に用いる。

【使用方法等】

〔組合せて使用する医療機器〕

販売名：ベレッツァ 5x ミリングマシン

届出番号：26B1X10008000045

〔使用方法〕

- ①ベレッツァ 5x ミリングマシンの取扱説明書に従い、本品をベレッツァ 5x ミリングマシンに取り付ける。
- ②ベレッツァ 5x ミリングマシンに加工データを転送して切削加工を行います。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ①本品をベレッツァ 5x ミリングマシンに確実にセットし、振れがないことを確認すること。

***【使用上の注意】**

1）使用注意

- ①本品はベレッツァ 5x ミリングマシン以外の加工機には使用しないこと。
- ②損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）などのあるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10：00～午後5：00

製造元：アルム デンティストリー カンパニーリミテッド

ARUM DENTISTRY Co., Ltd.

国名：韓国

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10：00～12：00 午後1：00～5：00