

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

F シャイン

【形状・構造及び原理等】

形状：白色固形物

成分：酸化アルミニウム、脂肪酸 他

原理：酸化アルミニウムを含んだ本品をブラシ等に付着させて補綴物を研磨することにより、補綴物の滑沢かつ光沢を出す。

【使用目的又は効果】

補綴物等を口腔外で研磨する際に使用する。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用エンジンやマイクロモーターに装着したブラシ、バフ、フェルトホイール等の歯科用研磨器材に付着させます。
- 2) 本品が付着した歯科用研磨器材を10,000～15,000rpm程度回転させ、断続的に補綴物に押しつけ、艶が出るまで研磨します。
- 3) 研磨後、補綴物を洗浄します

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・本品は、口腔内では使用しないこと。
- ・研磨に適した使用回転数の範囲内で使用すること。
- ・研磨後、本品の付着物は、超音波洗浄器、スチームクリーナー等で洗い流すこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・本品を使用して研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関の検定に合格した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - ・本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を着用すること。本品が、万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は、高温、多湿、直射日光を避けて、室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金(祝日を除く)

午前 10：00～午後 5：00

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金(祝日を除く)

午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00