

歯科材料06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 70891000

ベゴ ウイロジル

*【形状・構造及び原理等】

形状：白色及び水色の粘度のある液状
成分：ポリオルガノシロキサン、酸化シリコン、白金錯体

項目	仕様
硬さ	17（ショアーA）
操作時間	約5分

*【使用目的又は効果】

複模型の作製に用いる。

*【使用方法等】

- 1）ワックスでブロックアウトしたマスターモデルを専用フラスコのベースに固定します。パラタルアーチを模型に合わせて高さ調整します。
- 2）1液と2液を同量の割合（混合比1:1）でミキシングカップに取り、スパチュラでムラの無い均一な色になるまで混和します。
- 3）混和後、専用フラスコに流し込みます。
- 4）約45分間静置した後にフラスコから取り出します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1）除菌剤などの塩素系材料は硬化を阻害するので、混入しないように注意すること。
- 2）10℃以下の低温条件下では、硬化が著しく遅延する可能性があるので注意すること。
- 3）本材が衣服に付着すると除去しにくいので注意すること。

*【使用上の注意】

- 1）使用注意
 - ①開封後はできるだけ速やかに使用すること。
 - ②本材又は練和物が皮膚に付着した場合は、布又は紙などで拭き取り、石鹸でよく洗浄すること。また、使用後は必ず、うがい、手洗い、洗顔などを行うこと。
 - ③本材は換気のよいところで使用すること。
- 2）重要な基本的注意
 - ①本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、プラスチックグローブを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症を起こした場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
 - ②本材または練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・使いきりを基本とするが余った場合は密閉し、室温の乾燥した場所に保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[使用期限]

本体に記載の使用期限までに使用すること。
〔記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。〕
記載方法：  0000-00は
使用期限 0000年00月を示す。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）
住所：〒621-0001
京都府亀岡市旭町樋ノ口88
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10:00～午後5:00
製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ
ウिल्ヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH &
Co.KG
国名：ドイツ
販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10:00～12:00 午後1:00～5:00