

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

ベゴ サービカルワックス

＊【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、マイクロリスタリン、
カルナバ、他
形状：常温で固形
原理：加熱により軟化・融解する。

項目	仕様
融点	59℃
灰分	0.015%
フロー	77%

＊【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製を行う。

＊【使用方法等】

- 1) 加熱されたインストルメントを使用し、適度に溶解させたと
ころで支台歯模型のマージン部に盛り上げていきます。
- 2) 上記作業を繰り返し、クラウン及びインレーのマージン部形
状を作製します。
- 3) 彫刻刀などを使用して補綴物外形を完成させます。
- 4) ワックスパターンの埋没、焼成、鋳造は通法に従い作業して
ください。

＊【使用上の注意】

- 1) 使用注意
①本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
②本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

＊【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所
など）には放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管
しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理
すること。

＊＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～午後 5：00

製造元：ベゴ ブレーマ ゴールドシュレーゲライ

ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &

Co. KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00