

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

ベゴ クラウンワックス ハード

*【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、マイクロスチリン、ロジン、他

形状：常温で固形

原理：加熱により軟化・溶解する。

| 項目 | 仕様 |
|-----|--------|
| 融点 | 60℃ |
| 灰分 | 0.015% |
| フロー | 82% |

*【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製を行う。

*【使用方法等】

- 1) 加熱されたインスツルメントを使用し、適度に溶解させたところで支台歯模型に盛り上げていきます。
- 2) 上記作業を繰り返し、クラウン及びインレーの形状を作製します。
- 3) 彫刻刀などを使用して補綴物外形を完成させます。
- 4) ワックスパターンの埋没、焼成、鑄造は通法に従い作業してください。

*【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
 - ②本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～午後5:00

製造元：ベゴ プレマ ゴールドシュレーゲライ

ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH &

Co.KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～12:00 午後1:00～5:00