

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

ベゴ ディッピングワックス

※【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、マイクロリスタリン、他
形状：常温で固形
原理：加熱により軟化・溶解する。

項目	仕様
融点	70～75℃
灰分	0.02%

※【使用目的又は効果】

支台歯等にワックスコーティングを行いコーピング等を作製する。

※【使用方法等】

- 1) 本品をワックススポット等で70～75℃に加熱し、溶解します。
- 2) 支台歯模型を35℃に温め、ディッピングします。
- 3) 硬化後、彫刻刀などを使用してマージン部を完成させます。
- 4) ワックスアップは通法に従い作業してください。

※【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
 - ② 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

※【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
- ・ 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10：00～午後5：00

製造元：ベゴ ブレーマ ゴールドシュレーゲライ

ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei

Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10：00～12：00 午後1：00～5：00