

歯科材料07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030  
**ベゴ プラスチック スティック**

**【形状・構造及び原理等】**

形状：丸棒状  
成分：ポリメチルメタアクリレート  
灰分：0.2%

**【使用目的又は効果】**

修復物等の製作に用いる既製パターン。

**【使用方法等】**

- 1) 鑄造用ワックスパターンのスプルーとして、必要な長さに切り取ります。
- 2) 通法によりワックスアップを行います。

**【使用上の注意】**

- 1) 使用注意
  - ①本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
  - ②本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）  
住所：〒621-0001  
：京都府亀岡市旭町樋ノ口88  
ホームページ：www.nissin-dental.jp  
製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ  
：ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ  
：ハ ウンド コ カゲ  
：BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH &  
：Co.KG  
国名：ドイツ  
販売元：株式会社アイキャスト  
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）  
：電話受付時間 月～金（祝日を除く）  
：午前10:00～12:00 午後1:00～5:00