

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

ベゴ マンドレル

【形状・構造及び原理等】

形状：棒状
成分：ステンレス
構造：① ディスク用のマンドレル
② 研磨カップ用のチップホルダー

販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10：00～1：00 午後1：00～5：00



※スチールナンバー：1.0718
※軸径：2.35 mm

※【使用目的又は効果】

研削砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するシャフトです。

※【使用方法等】

軸先端にセパレーティングディスク、研磨カップなどを取り付け使用します。

※【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は、ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャック状態でないことを確認すること。
- ②本品は、使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸引しないこと。

※【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう適切に保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）
住所：〒621-0001
：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10：00～午後5：00
製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーグライ
ウィルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &
Co. KG
国名：ドイツ