

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000


ベゴ レッドポイント

*【形状・構造及び原理等】

形状：ポイント頭部と軸部からなる

頭部：アルミナ結合セラミック

軸部：ステンレス

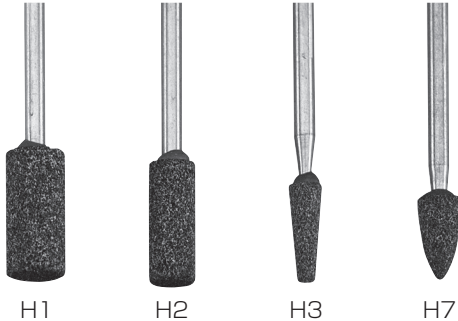

スチールナンバー：1.4104 タイプ2

**推奨回転数：30,000-50,000rpm
軸径：2.35mm

*【使用目的又は効果】

炭化ケイ素、アルミナ等を用いた技工用研削材です。

*【使用方法等】

ハンドピースに取り付けて使用します。

*【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は、ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャック状態でないことを確認すること。
- ②本品は、使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸引しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～午後5:00

製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ

ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH &

Co.KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～12:00 午後1:00～5:00