


歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

ベゴ ラバーポリッシャー

*【形状・構造及び原理等】

形状：ホイール、ポイント、ナイフエッジの3種類

成分：アルミナ結合ゴム

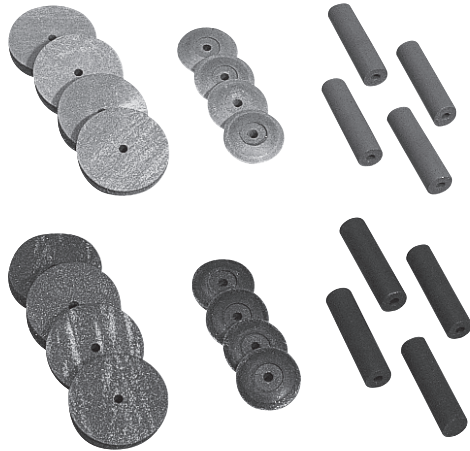

**推奨回転数：6,000-10,000rpm

*【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合されたアルミナを研磨成分とする歯科用研磨材です。貴金属用（緑）、非金属用（黒）の2種類があります。

*【使用方法等】

マンドレール、チップホルダーに取り付けて使用します。

*【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ②本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸引しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け、室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～午後5:00

製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ

ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH &

Co.KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～12:00 午後1:00～5:00