

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

ベゴ セパレーティングディスク

＊【形状・構造及び原理等】

形状：円盤状
頭部：アルミナ

＊＊推奨回転数：15,000-20,000rpm（φ22）
15,000-20,000rpm（φ25）
10,000-20,000rpm（φ35）

＊【使用目的又は効果】

炭化ケイ素、アルミナ等を用いた技工用研削材です。

＊【使用方法等】

ハンドピースに取り付けて使用します。

＊【使用上の注意】

1）使用注意

- ①本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ②本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸引しないこと。

＊【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け、室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＊＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊ 製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）
住所：〒621-0001
：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前 10：00～午後 5：00
製造元：ベゴ ブレーマ ゴールドシュレーグライ
ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &
Co. KG
国名：ドイツ
販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00