

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000

ベゴ オートフラッシュ

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

寸法：約 310(L)×310(W)×140(H)
重量：約 6kg



2) 電氣的定格

定格電圧：AC 100、115、230V
周波数：50Hz / 60Hz

3) 原理

光を照射することで光重合型レジン材料を重合させる。

【使用目的又は効果】

歯科技工作業における光重合型レジン材料の重合に使用する。

【使用方法等】

詳細な設置方法や操作方法については、取扱説明書等を必ず参照して下さい。

- 1) 本体の電源を入れます。
- 2) 重合させる造形体を重合チャンバーに入れます。
- 3) フラッシュの回数（重合時間）をセットします。
- 4) 必要に応じて、ガスのスイッチを入れます。
- 5) スタートボタンを押して重合させます。
- 6) 光照射が終了後、重合チャンバーから造形体を取り出します。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ①本体及び重合物は高温になるので、操作中及び操作後の取扱いに注意すること。
- ②チャンバー内のテーブルをきちんと設置すること。
- ③本体の上に物を載せた状態で使用しないこと。
- ④チャンバー内で液体、金属粉などを扱わないこと。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を必ず参照してください。

- ①樹脂の硬化条件を確認の上使用すること。
- ②ライトの光線を直視しないこと。
- ③ランプに触れないこと。誤って触れた場合はアルコールで皮脂を拭き取ること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対応する安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

記載の耐用期間は自己認証による。
製造後、正規の保守点検を行った場合に限り5年間。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書を必ず参照してください。

- 1) 日常点検は取扱説明書に従って行うこと。
- 2) 保守・点検の際は本体の電源を切り、電源コードを接続しないこと。
- 3) 本体前面のディスプレイの後ろのダストフィルターは汚れの程度に応じて定期的に清掃又は交換すること。
- 4) 医療機器の使用保守の管理責任は使用者側にある。
- 5) 保守点検は使用者側で行うのが原則であるが、行われない場合には、医療機器修理業等の有資格者に外部委託してもよいことが認められている。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～午後 5：00

製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ

ウィルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00