

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000

スーパージスク

【形状・構造及び原理等】

材質: 黒色アルミナ質研削材
合成ゴム

形状:

番号	サイズ(mm)
#1	φ38×0.6
#2	φ23.8×0.6
#3	φ22×0.25
#4	φ22×0.2

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社
**住所: 〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
**電話番号: 075-672-2118

外国製造所: SONG YOUNG INTERNATIONAL Co.
(ソングン インターナショナル)
国名: 台湾

【使用目的又は効果】

アルミナ系研削材を含有するジスク状の形態をもつ研削器具。
歯科補綴物等のスプルー切断、形態修正等に用いる

【使用方法等】

本品を歯科用マンドレルに固定し、技工用ハンドピースに装着し、回転させ、被研削物に押しあてて使用します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1)ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2)予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①25,000 rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分を避けて、外圧(物理的負荷)を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

100枚/函