

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう JMDN70897020

スルホンストーン・H

【形状・構造及び原理等】

形状：粉末

成分：硫酸カルシウム半水塩

性能等：

項 目	仕 様
標準混水量	24 mL／粉 100 g
硬化時間	6～10 分
硬化膨張	0.4 %
圧縮強さ	40～50 MPa
流動性	50～70 mm

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するための義歯床用作業模型及びびろう義歯コーティングとして用いる。

【使用方法等】

混水量は粉末 100 g に対して水 24 mL が標準です。
練和は約 60 秒以上練和します。20 秒間手練りで水と粉を馴染ませてから 50 秒以上真空練和を行って下さい。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品を扱う際（硬化体を研削する場合も含む）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本品の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐため保護メガネなどの防具を使用すること。
- ・本品は歯科用石こうでの用途以外は使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は密封して保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

包装に記載の使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は、輸入先製造業者データによる。〕

【包装】

質量：3 kg／袋 18 kg／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

**住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

**電 話 番 号：075-672-2118

*製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社

外国製造業者：ムンギョウ・ジプサム&エンジニアリング・コーポレーション

MUNGYO GYPSUM & ENGINEERING CORPORATION

国 名：大韓民国