

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

ドレープ（丸穴）

再使用禁止

滅菌済

【 警告 】

- 可燃性消毒薬をご使用の際は、消毒用アルコール等を拭き取り、又は気化拡散させてから使用してください。（電気メス等をご使用の際、気化したアルコール蒸気の濃度により、引火することもあります。）

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】＊

- 本品は不織布を基布として、場合により合成樹脂フィルム等を組み合わせたものを原料として、裁断、ヒートシール、穴開け等の加工、及び付属品（身体等に添付するための固定材等）を組み合わせ滅菌したものです。

【 使用目的、効能又は効果 】

- 手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具です。本品は、患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用します。本品は単回使用です。

【 操作方法又は使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

【 使用上の注意 】＊

- 本品は無菌操作を熟知した医療従事者がご使用ください。
- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 開封した残品は使用しないでください。
- 高熱を発する医療機器等に接触させないでください。
- 粘着テープ付ドレープを使用する場合は、消毒液が充分乾いてから使用してください。
- 粘着テープ付ドレープの粘着剤が皮ふ剥離を起こす危険性があるため注意して使用してください。
- 伸縮性フィルム付ドレープを使用する場合は、使用される患者の体型に合った適切なサイズを使用してください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【 貯蔵・保管方法及び使用期間等 】

1、貯蔵・保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2、使用期限

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 包装 】

- 入数をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等 】＊

製造販売元：川本産業株式会社

住所：大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 4 号

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

製造元：川本産業株式会社