

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

エ ン ド ラ ク タ ー®

再使用禁止

滅菌済

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売元：川本産業株式会社
住所：大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 4 号
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）
製造元：川本産業株式会社

®：登録商標

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品はセルロースのスポンジにX線造影材を組み合わせたものです。
- 本品は形状維持のためのプラスチック容器に入っています。
スポンジ : セルロース 100%
X線造影材 固定材：ポリプロピレン・ポリエステル
造影剤：硫酸バリウム
着色剤：青色顔料

【 使用目的、効能又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具です。

【 操作方法又は使用方法等 】

- 本品を清潔に取り出し、内視鏡外科手術で臓器圧排材として使用してください。
- 体腔内へ挿入後、生理食塩水にて膨潤させてから使用してください。

【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 電気メス等を近づけると、引火したり、X線造影材が剥がれるおそれがあるので、注意して使用してください。
- 本品を使用する場合は、内径 12mm以上のトロカールを使用してください。
- 使用前、使用中に関わらず本品を切る等の加工はしないでください。
- 体腔内への無理な挿入や抜去、器具類を使用しての粗雑な扱い、鉗子で薄く小さくつかむなどは、本品の破断の原因となるので、注意して使用してください。
- 本品を体外に抜去するときは、2～3cm以上の切開部から本品が破断しないように注意して抜去してください。
- 開封し、使わなかったものは使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意して処理してください。

【 貯蔵・保管方法及び使用期間等 】

1.貯蔵・保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2.使用期限

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 包装 】

- サイズ・入数をパッケージに記載しています。