

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット 33961001
消毒セット I

再使用禁止

滅菌済

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

ピンセット、鉗子

[使用方法]

- 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となりますので絶対に行わないでください。
- 電気メスと直接接触させないでください。[火傷や感電の恐れがあります。]

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は各種医療機器、医薬品等のうち、二品目以上の構成部品を組み合わせて構成する組み合わせ医療機器を滅菌したものです。
- 構成部品の名称及び数量は、構成部品表又は表示ラベルに記載しています。

【 使用目的又は効果 】

- 一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットです。本品は単回使用です。

【 使用方法等 】

- 開封して適宜使用してください。

【 使用上の注意 】

- 袋が開封、破損及び汚損している場合や構成部品に破損等の異常がある場合は使用しないでください。
- 開封後は直ちに使用してください。
- 使用後は感染防止に留意し処理してください。
- 開封した残品は使用しないでください。

ガーゼ、デクーゼ、セミデクーゼ、タンポンガーゼ、ケーパイ
ン

- ・ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるので、注意して使用してください。

綿 棒

- ・綿体に直接手をふれないでください。

シート

- ・ラミネート面を下側にして使用してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1、保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）を袋に記載しています。