

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット 33961001
透 析 セ ッ ト I

再使用禁止

滅菌済

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

ピンセット、鉗子、ハサミ【使用方法】

- 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となりますので絶対に行わないでください。
- 電気メスと直接接触させないでください。[火傷や感電の恐れがあります。]

グローブ

[適用対象（医療関係者、患者）]

- 今までにアナフィラキシー症状の経験がある医療関係者及び患者への使用は禁止してください。

【形状・構造及び原理等】

- 本品は各種医療機器、医薬品等のうち、二品目以上の構成部品を組み合わせ、全体として滅菌したものです。
- 構成品の名称及び数量は、構成部品表又は表示ラベルに記載しています。

グローブ

- 本品は天然ゴムを使用しています。

【使用目的、効能又は効果】

- 一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットです。本品は単回使用です。

【操作方法又は使用方法等】

- 開封して適宜使用してください。

【使用上の注意】

- 袋が開封、破損及び汚損している場合や構成部品に破損等の異常がある場合は使用しないでください。
- 開封後は直ちに使用してください。
- 使用後は感染防止に留意し処理してください。
- 開封した残品は使用しないでください。

ガーゼ、デクーゼ、セミデクーゼ、タンポンガーゼ、ケーパイン

- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるので、注意して使用してください。

グローブ

1、使用注意

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。
- 天然ゴムと接触する機会の多い方は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

2、重要な基本的注意

- 爪先・刃物等 尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意してください。

3、相互作用

- 高濃度の薬品や溶剤（ガソリン・灯油・ベンジン等）によっては硬化・浸透することがあるので確認の上使用してください。

綿 棒

- 綿体に直接手をふれないでください。

シーツ

- ラミネート面を下側にして使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1、貯蔵・保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2、有効期間・使用の期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【包装】

- 入り数をパッケージに記載しています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：川本産業株式会社

住所：大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 4 号

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

製造元：川本産業株式会社