

医療用品04 整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ(JMDNコード:35531000)

## クーデック®ブレスウォーム®

再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

本製品は吸湿発熱繊維(アクリレート系繊維)を配合し、保温性を高めた不織布オリーブであり、手術室、その他処置室で患者身体の一部を保護するために覆い使用する。

#### <外觀形状>

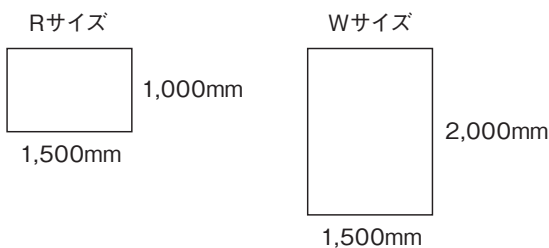

#### <材質>

指定外繊維(アクリレート系繊維):60%  
ポリエステル:40%

### 【使用目的又は効果】\*

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具である。本製品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本製品は単回使用である。

### 【使用方法等】\*

- 包装を丁寧に開封し、本製品を取り出す。
- 患者身体の適切な部位を覆う。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- 使用上差し支えのある汚れや異物及び破損がないことを確認し、異常を認めた場合は使用しないこと。
- 本製品は非滅菌製品のため、手術野等清潔性を必要とする部位には使用しないこと。
- 使用中は常に患者の体温を測定すること。
- 使用中に患者の高体温又は低体温を含む異常を認めた時は直ちに使用を中止し適切な処置を行なうこと。
- 本製品を強く引っ張らないこと[破れや破損の恐れがある]。
- 本製品は滅菌使用を意図していない。
- 本製品は吸湿発熱繊維の特性により色合いや風合いに多少のばらつきがあるが、使用上の問題はない。

### 【保管方法及び有効期間等】\*

#### <保管方法>\*

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、紫外線、ほこり、塩分やイオン等を含んだ空気などにより悪影響の生じるおそれの無い場所に保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃等、製品の安定状態に注意すること。
- 化学薬品のそばやガスの発生するような場所に保管しないこと。
- 高温多湿を避けて保管すること。\*

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

#### <製造販売業者>

大研医器株式会社  
TEL 0725-51-2138

#### <製造業者>

株式会社ララ