


機械器具 42 医療用剥離子  
一般医療機器 起子 11504000

## 起子(0914)

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

代表的写真

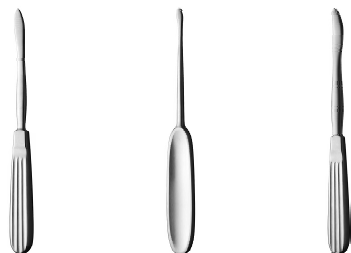

#### 2. 原材料: ステンレス鋼

#### 3. 原理

先端により組織を引っ掛けて持ち上げる。

### 【使用目的、効能又は効果】

組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具の持ち上げ、配置又は梃子による押し上げに用いる手術器具をいう。形状及びサイズは解剖学的用途及び機能によって異なる。

### 【品目仕様等】

柄から先端部にのびる部分は例外を除いて直線性であり、歪曲しないこと。先端部にこぼれがないこと。

### 【操作方法又は使用方法等】

- 1) 使用前に、必ず洗浄・滅菌する。134℃/5分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- 2) 柄を操作して先端部で組織又は他の解剖学的構造等を持ち上げる。

### \*【使用上の注意】

1. 禁忌・禁止
  - 1) 使用目的以外に使用しないこと。
  - 2) 本品の二次的加工をしないこと。
2. 重要な基本的注意  
本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
3. その他の注意  
器具を保護する保守油が塗布されているので、適切な油除去を行ってから滅菌処理を行うこと [油が付着したまま高圧蒸気滅菌を行うと、器具が変色する可能性がある]。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
- 2) 滅菌した状態で保管する場合、滅菌有効期限を管理する。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 洗浄・消毒、滅菌

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。
- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- 4) 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。

#### 2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・破損・変形等を点検する。

### 【包装】

1本/袋

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号  
TEL 0725-53-5546

製造業者: ヒルプロ インスツルメンツ社 パキスタン  
Hilbro Instruments (Pvt) Ltd.