

再使用禁止

ABIS ディスポーザブル生検バルブ

<禁忌・禁止>

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

<オリンパス・富士フィルム内視鏡用>
(ポート付)

<オリンパス・富士フィルム内視鏡用>



<ペンタックス内視鏡用①>



<ペンタックス内視鏡用②>

	適合内視鏡
オリンパス用	140/160/180/190/240/260/290 シリーズ
富士フィルム用	500&600 シリーズ/700 シリーズ
ペンタックス用①②	90K/90i シリーズ K10/i10/i10c, J10(消化管)

2. 原材料

シリコンラバー、ポリカーボネート

3. 原理

本品を内視鏡鉗子口に装着することにより、内視鏡管内からのガスや液体の逆流を防ぐ。

【使用目的又は効果】

本品を内視鏡の鉗子口に装着し、体内ガスや液体が逆流することを防止する。
本品は単回使用である。

【使用方法等】

本品は単回使用製品であり、再使用できない。

- 1) 本品と内視鏡が適合しているか確認する。
- 2) 本品を内視鏡の鉗子口に取り付ける。
- 3) 注水チューブをポートに取り付ける。(ポート付に限る。)
- 4) 使用が終わった本品は、地域の規則に従って破棄する。

【使用上の注意】

- ・本品が使用可能な内視鏡を確認する。
- ・手技中に、内視鏡に取り付けた本品のキャップが開いてしまった場合、漏れが発生することがある。漏れが発生した時は、滅菌済みの布ガーゼで本品を塞ぐこと。
- ・内視鏡に取り付けた本品から機器をぶら下げたままにしない。
切り込み部分が広がり液漏れが起こる。もし、液漏れが起きたときは、消毒済みガーゼで本品を塞ぐ。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

温度：10℃～23℃

湿度：30%～85%RH

直射日光を避け、空気が汚染・浸食されていない喚起が充分ある乾燥した部屋で保管して下さい。

有効期間

3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

販売業者：株式会社アビス

兵庫県揖保郡太子町佐用町 471-1

TEL：079-275-1188 FAX：079-275-1200

製造販売業者：株式会社エムディアイジャパン

TEL：06-6358-8022

製造業者：Yangzhou Fartley Medical Instrument Technology
Co.,Ltd. (中国)