

ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ

（汎用胃瘻カテーテル用、ISO80369-3 適合品）

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

〔構造図（代表図）〕

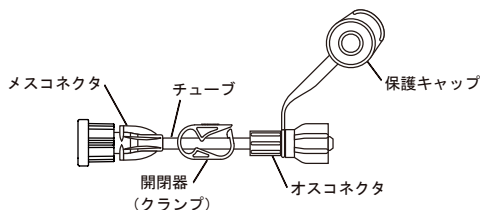

コネクタはISO80369-3（経腸栄養用コネクタ規格）に適合する。

*2. 材質

メスコネクタ	ポリ塩化ビニル
オスコネクタ	ポリ塩化ビニル
チューブ	ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニルの可塑剤は、トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシルを使用している。

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤を投与する器具をいう。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. オスコネクタを栄養剤バッグの開口部に接続します。
3. チューブ内を栄養剤で満たし、開閉器（クランプ）を閉じます。
4. メスコネクタを胃瘻カテーテルに確実に接続します。
5. 開閉器（クランプ）を開放し、投与を開始します。
6. 投与後、開閉器（クランプ）を閉じ、胃瘻カテーテルからメスコネクタを取り外します。感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。
7. 胃瘻カテーテルに本品を残す場合は、開閉器（クランプ）を閉じた後、保護キャップをします。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品は、ISO80369-3（経腸栄養用コネクタ規格）対応のため、ISO80369-3に適合する製品と接続してください。ISO80369-3であるかどうかは包装表示で確認してください。
2. 接続部への経腸栄養剤や医薬品等の付着に注意してください。
〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は未滅菌品であるので、清浄領域では使用しないこと。
- 2) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 3) チューブとコネクタの接合部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷をかけないように注意すること。〔チューブの抜け、破損、伸び等のおそれがある。〕
- 4) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。
〔コネクタが外れなくなる、又はコネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
- 5) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]