


ニプロスネークチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
 ○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

* 本品は各種の器具及びカテーテル、チューブに接続して体液及び気体を流通するのに用いられるチューブである。

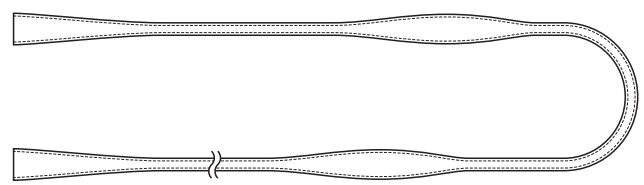

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

*

品 番		内径	外径	全長
NSK-0	平行部	6.9mm	9.6mm	30m
	ファネル部	10.4mm	14.4mm	
NSK-1	平行部	4.8mm	6.9mm	
	ファネル部	9.3mm	12.9mm	
NSG	平行部	3.2mm	5.1mm	
	ファネル部	8.0mm	11.0mm	

***【使用目的、効能又は効果】**

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
- * 2. 接続機器の接続口、接続するカテーテル、チューブのファネル部に適合するチューブを選択します。
- * 3. 必要な長さに切断し、しっかりと接続します。

*** ＜使用方法に関連する使用上の注意＞**

1. 接続部への体液や薬液等の付着に注意して下さい。[接続部の緩み等が生じる可能性があります。]
2. 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- * ○未滅菌品のため、体外での排液・排気カテーテルの延長以外には使用しないこと。
- * ○包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

- * ○使用は1回限りとし、再使用しないこと。
- * ○使用するにあたって、目的とする製品であることを確認すること。
- * ○併用する医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- * ○本品は脂溶性溶剤存在下で塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出する可能性がある。
- * ○あらかじめ接続部に緩みや液漏れ等がないことを確認してから使用すること。使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。
- * ○チューブが折り曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。
- * ○チューブを鉗子等でつまんで傷をつけないように、さらに、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。[液漏れや破損が発生する可能性がある。]
- * ○体動でねじれると流路が閉塞する可能性があるので注意すること。
- * ○使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿をさけて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
 外箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

1巻／箱

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売（お問い合わせ先）
 ニプロ株式会社
 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
 電話番号：06-6372-2331(代表)

製造
 ニプロ株式会社