

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
* 一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

ニプロコネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


NCN-S




NCN-F




NCN-Y0

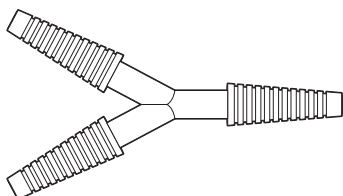

NCN-Y1

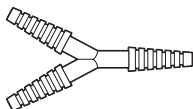

NCN-T0

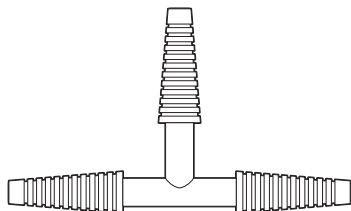

規格	適合チューブ内径	形態
NCN-S	6.3～12.5mm (太径)	ストレート、大⇄小
	3.1～6.3mm (細径)	
NCN-F	6.3～12.5mm	ストレート、大⇄大
NCN-Y0	6.3～12.5mm	Y字、大
NCN-Y1	3.1～6.3mm	Y字、小
NCN-T0	6.3～12.5mm	T字、大

＊【使用目的、効能又は効果】

カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテルを身体に挿入するために用いる器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 接続するカテーテル、チューブのファネル部に適合するコネクターを選択します。
3. しっかりと接続します。

＊＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 接続部への体液や薬液等の付着に注意して下さい。[接続部の緩み等が生じる可能性があります。]
2. 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- * ○使用は1回限りとし、再滅菌、再使用しないこと。
- * ○使用するにあたって、目的とする製品であることを確認すること。
- * ○併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- * ○あらかじめカテーテル、チューブとの接続部に緩みや液漏れ等がないことを確認してから使用すること。使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。
- * ○接液部を汚染させないこと。
- * ○使用期限の過ぎたものは使用しないこと。
- * ○低温下の衝撃で破損する危険があるため、低温時の取り扱いに注意すること。
- 包装を開封したら直ちに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿をさけて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
外箱の使用期限欄を参照のこと(自己認証による)。

【包装】

50、100本／箱

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売(お問い合わせ先)
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6372-2331(代表)

製造
ニプロ株式会社



ニプロ株式会社