

機械器具54 医療用捲綿子  
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

## ニプロスポンジスワブ®


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

○再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、プラスチック製の軸の先端にスポンジが付いた検体採取用のスワブである。

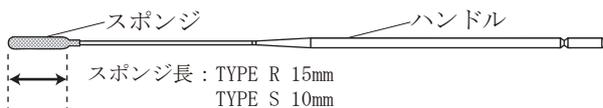

#### 【使用目的又は効果】

本品は検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

#### 【使用方法等】

スポンジ部分を汚染ないように包装袋から取り出し、スポンジ部分で検体を採取する。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- \* 1) 包装から本品を取り出す時は、スポンジ部分およびハンドル部分を指で押さえないこと。[スポンジ部分が指と接触し、スポンジ部分が離脱・脱落するおそれがある。]
- 2) 個包装の開封後は速やかに検体採取を行い、検体を採取後は速やかに検査に供すること。
- 3) 本品に破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れなどがあった場合は、使用しないこと。
- 4) 検体を採取するとき、採取する部位は粘膜なので傷つけないよう、無理な力をかけないこと。
- 5) 全ての検体は汚染されているものとして注意して取り扱い、使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。

##### \* 2. 不具合・有害事象

スポンジ部分の離脱・脱落

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

##### 2. 有効期間

包装・外箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

\*\* 有効期間：滅菌後4年

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社（医療システム営業部）

電話番号：03-5684-5611

製造

ニプロ株式会社