

機械器具54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

ニプロスポンジスワブ®

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、プラスチック製のハンドルの先端にスポンジが付いた
検体採取用のスワブである。



2. 材質

スポンジ：ポリウレタン

ハンドル：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

【使用方法等】

スポンジ部分を汚染ないように包装袋から取り出し、スポンジ部分で検体を採取します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装から本品を取り出す時は、スポンジ部分およびハンドル部分を指で押さえないこと。[スポンジ部分が指と接触し、スポンジ部分が離脱・脱落するおそれがある。]
- 2) 個包装の開封後は速やかに検体採取を行い、検体を採取後は速やかに検査に供すること。
- 3) 本品に部分的な白化があった場合は、使用しないこと。
- 4) 検体を採取するとき、採取する部位は粘膜なので傷つけないよう、無理な力をかけないこと。

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) スポンジ部分の離脱・脱落

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

*有効期間：滅菌後4年(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売(お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

電話番号：03-5684-5611

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社