

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

ニプロ排液チューブキャップ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、吸引器のチューブ先端と吸引カテーテルを接続するコネクタである。

吸引器のチューブ先端に本品のオスコネクタを接続し、メスコネクタに吸引カテーテルを接続する。吸引カテーテルと接続していないメスコネクタは、キャップを閉めることで、排液漏れを防止できる。

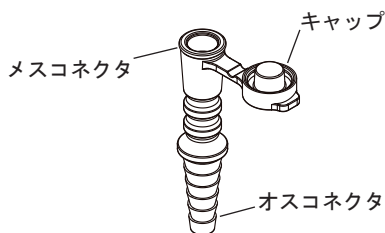

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限を参照のこと。（自己認証による。）

有効期間：製造後3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

尼普洛（上海）有限公司

[NIPRO(SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]

【使用目的又は効果】

カテーテルを容器等の別の対象物に接続する機器である。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品のオスコネクタを吸引器のチューブ先端に接続し、キャップを閉めます。
3. 吸引の際はキャップを外し、本品のメスコネクタを吸引カテーテルのコネクタに接続します。
4. 吸引後、吸引カテーテルを外し、キャップを確実に閉めます。
5. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) 吸引器のチューブ、吸引カテーテルとの接続は確実に行ってください。〔外れるおそれがあります。〕
- 2) キャップを閉めた際には、確実に閉まっていることを確認してください。〔排液が漏れ、汚染されるおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 吸引器のチューブや吸引カテーテルとコネクタの接続部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷を加えないよう注意すること。〔外れ、破損等が発生するおそれがある。〕

2. 相互作用（他の医薬品、医療機器等との併用に関すること）

- 1) 吸引器のチューブ、吸引カテーテルのコネクタのサイズによっては接続できない、あるいは接続部が外れやすい場合や吸引後、吸引カテーテルが外しにくい場合があるため注意すること。

3. 不具合・有害事象

- 1) 不具合
 - (1) 破損
 - (2) 接続部の外れ
 - (3) キャップの外れ
- 2) 有害事象
 - (1) キャップ外れによる汚染



ニプロ株式会社