

スリムドレーン コネクティングチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法


1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 標準タイプ



* 2. Yタイプ

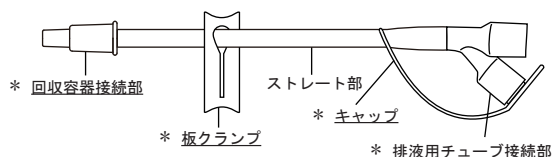

【使用目的又は効果】

排液用チューブと回収容器を接続し、排液ラインを延長するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- * 1) 本品の排液用チューブ接続部に排液用チューブのコネクタを接続します。
- * 2) 本品の回収容器接続部を回収容器に接続します。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

2. 組み合わせて使用する医療機器

- * 1) 排液用チューブ（バック用タイプのコネクタを用いる）
 - (1) 販売名：UKドレーンカテーテル
 - 承認番号：22100BZX00947000
 - (2) 販売名：スリムドレーンコネクター
 - 届出番号：27B1X00045000116
- 2) 回収容器（平型、卵型）
 - (1) 販売名：スリムドレーンバック
 - 届出番号：27B1X00045000115

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1. 本品に排液用チューブと回収容器を接続後、各接続部がしっかりと嵌合していることを確認し、必要に応じて、結束バンドを併用するなどの補強策をとってください。
- * 2. 本品Yタイプに排液用チューブを2本接続する際は、予め片方のコネクタの先を段差付近から切り落としてから排液用チューブ接続部に挿入してください。〔排液用チューブ接続部内でコネクタ同士の先が当たって十分挿入できないおそれがあります。〕

- * 3. 回収容器のスリムドレーンバック平型に本品を2本接続する際は、予め片方の回収容器接続部の先を段差付近から切り落としてから挿入してください。〔スリムドレーンバック平型の吸引口内で回収容器接続部同士の先が当たって十分挿入できないおそれがあります。〕
- 4. 本品を直列に2本以上接続して使用しないでください。〔排液漏れ、エアリーク、排液不良のおそれがあります。〕
- * 5. チューブを鉗子等で閉塞する場合、各接続部と一緒に閉塞しないでください。〔破損のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 消毒、清拭等の目的で、アルコール、アセトン、ベンジン等の有機溶媒を使用しないこと。〔強度が低下し、破損のおそれがある。〕
- 2) 本品の接続時及び使用中は、接続部がしっかりと嵌合していること、破損、緩み、排液漏れ、詰まり等の異常がないことを定期的に確認すること。
- 3) 体動でねじれると流路閉塞のおそれがあるので注意すること。

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 排液漏れ、吸引不良
- (2) 破損
- (3) エアリーク

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後5年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ株式会社