

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 排水バック 70308000

ニプロドレナージバッグ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

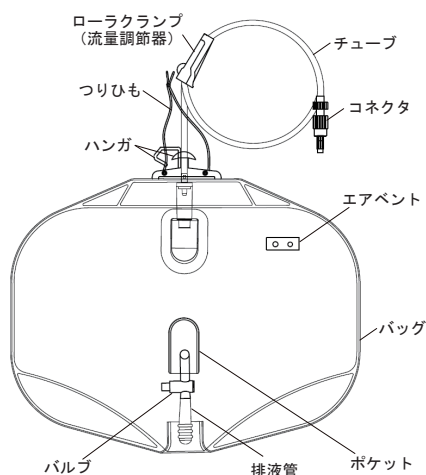

バック容量：500～5000mL

コネクタはISO 80369-7（皮下注射及び血管系等）に適合する形状とドレインチューブに直接接続する形状がある。

【使用目的又は効果】

本品は、ドレインチューブ等に接続して体外に排出した体液等を貯留するために用いる排水バッグである。

【使用方法等】

1. ローラクランプ（流量調節器）がある場合は、ローラクランプ（流量調節器）でチューブを閉じます。
2. バルブで排液管を閉じます。
3. コネクタを患者に挿入したドレインチューブ等と接続します。
4. つりひも、ハンガを利用して、本品を患者より低い位置になるようベッドサイドに固定します。
5. ローラクランプ（流量調節器）がある場合は、ローラクランプ（流量調節器）を開放し排液を行います。
6. バッグ内に溜まった液体を排出する際は、バルブを開放し排液管より排出を行います。

＜使用方法等に関する使用上の注意＞

1. 使用前にローラクランプ（流量調節器）、バルブが確実に閉じていることを確認してください。
2. 使用中は縦に吊したままの状態が保てるようにし、傾けたり、激しく動かさないでください。
3. 患部よりも高い位置で使用しないでください。〔適切に排液できなくなる、又は排液が逆流するおそれがあります。〕
4. 使用中は接続部の緩み、液漏れ、詰まり又は破損等がないことを定期的に確認してください。
5. 排液するとき以外は、排液管はポケットに収納してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 胸腔部等の圧力差が必要な部位の排液除去には使用しないこと。
- 2) バッグ容量を超えて使用しないこと。〔液漏れのおそれがある。〕
- 3) 泥状の排液によりチューブ等が詰まった場合は、ミルキング等を実施すること。

- 4) 外部から衝撃、過剰な力をかけないこと。〔液漏れ、破損のおそれがある。〕
- 5) 使用中はチューブの引張り、ねじれ、折れ曲がり注意到すること。〔チューブの破損、接続部の外れ等のおそれがある。〕
- 6) チューブのたわみ、患者の体位転換等によるチューブの閉塞に注意すること。〔排液が流れにくくなる、又は排液詰まりのおそれがある。〕
- 7) エアベントに排液等が付着すると排液が流れにくくなる場合がある。その場合は、本品を交換すること。

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 排液詰まり
- (2) 接続部の外れ
- (3) 排液の逆流
- (4) 液漏れ
- (5) 本品の破損

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

アムシノ メディカル(クンシャン) カンパニー, リミテッド

[Amsino Medical (Kunshan) Co., Ltd.]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社